

# TÉCNICA DE APLICAÇÃO

USANDO BARREIRAS BONE HEAL® E HEAL BONE®

## Passo 1: Preparação Inicial

O processo começa com uma avaliação detalhada e preparação do local para o procedimento.



Fig. 1

Como qualquer outro material implantável, o seu uso deverá atender os requisitos da cirurgia asséptica.



Fig. 2

**Passo 2: Aplicação da Barreira**  
A barreira Bone Heal® ou Heal Bone® é cuidadosamente posicionada para proteger a área de regeneração.

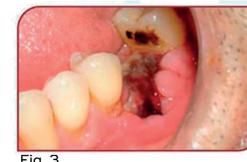


Fig. 3

A membrana preserva o coágulo, essencial para o processo de regeneração.



Fig. 4

**Passo 3: Formação Óssea**  
Novo tecido ósseo se forma progressivamente na área protegida.

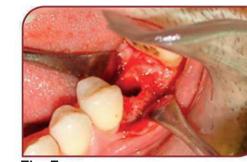


Fig. 5

Após 90 dias, a arquitetura do rebordo está completamente recuperada, com uma quantidade considerável de tecido queratinizado, estando pronta para receber um implante osteointegrável.




Fig. 6



Fig. 7

## Resultado Final

Após o período de osteointegração, obtém-se um excelente resultado de regeneração, permitindo a reabilitação protética do paciente.

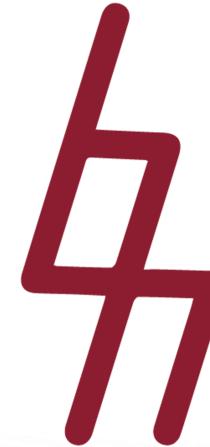

# Bone Heal®



## CONTATOS

Administrativo: (11) 99440-2278  
Vendas: (11) 94512-2884  
Email: [contato@boneheal.com.br](mailto:contato@boneheal.com.br)



Acesse nosso site  
[www.boneheal.com.br](http://www.boneheal.com.br)

# CATÁLOGO

# Bone Heal®

Simplifica a técnica de Regeneração Óssea Guiada com **segurança e previsibilidade**

# CATÁLOGO

BARREIRA PARA REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DAS BARREIRAS BONE HEAL® E HEAL BONE®

- 100% sintética, sem porosidades, resistente e bioinerte.
- Não absorvível, indicada para ficar intencionalmente exposta.
- Dispensa o uso de outros biomateriais e antibioticoterapia.
- Técnica de aplicação simples, acessível a clínicos gerais, sem necessidade de instrumentos especiais, nem cirurgia para removê-la.
- Não interfere na posição da linha mucogengival.
- Pronta para ser utilizada, não precisa ser hidratada.
- Possibilita inserir implante, unitário ou múltiplos imediatos ou em 90 dias.
- Promove ato cirúrgico de alto valor agregado e baixo custo.

## DIFERENCIAIS DAS BARREIRAS BONE HEAL® E HEAL BONE®

- Tecnologia exclusiva patenteada.
- Única barreira de polipropileno cientificamente comprovada com mais de 14 anos de controle de casos clínicos.
- Mais de 200 mil barreiras vendidas.
- Fabricante e produtos com a mesma qualidade e segurança há mais de 14 anos.
- Empresa pioneira e reconhecida mundialmente como a única no mercado odontológico por somente fabricar barreiras de polipropileno.



# CATÁLOGO

BARREIRA PARA REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA

## HEAL BONE®

Esta barreira de polipropileno é produzida através de processo fabril, que confere alta memória inicial. É mais acessível e entrega os mesmos resultados, simplicidade de manuseio e características principais do modelo Bone Heal®, **sendo capaz de permanecer instalada por até 28 dias**.

Indicada para ser utilizada em casos mais convencionais, como nas exodontias, associadas ou não com instalação de implantes imediatos.



PRAZO DE VALIDADE DE 2 ANOS. REGISTRO ANVISA: 81197599001

# CATÁLOGO

BARREIRA PARA REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA


## BONE HEAL®

Barreira de polipropileno não absorvível, **capaz de permanecer instalada por mais de 30 dias**, sendo assim, incomparavelmente versátil e ideal para uso em casos simples ou complexos.


Regenera simultaneamente o tecido ósseo e queratinizado, com alta previsibilidade, **dispensando uso de enxertos e outros biomateriais de preenchimento**. Sua memória a mantém estável em posição sobre o defeito, sem que haja alterações dimensionais.



PRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS. REGISTRO ANVISA: 81197599000

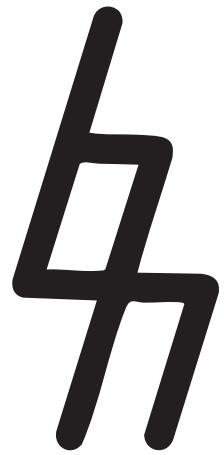

**Bone Heal®**

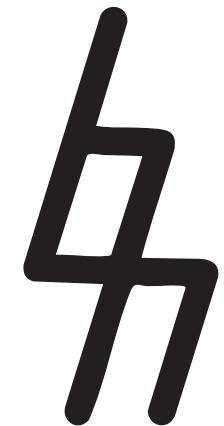

**Bone Heal®**

**Suplemento Nutritivo  
para Regeneração Óssea  
com Saponina e ginseng.**

## **PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DAS BARRIERS BONE HEAL® E HEAL BONE®**

**HEAL BONE®**

**BONE HEAL<sup>®</sup>**

## **DIFERENCIAS DAS BARREIRAS BONE HEAL® E HEAL BONE®**