

CONHEÇA A LINHA BONE SLIM®

Uma única tecnologia. Duas aplicações cirúrgicas.

Inteligente. Ultrafino. Versátil.

Bone Slim® foi desenvolvida obedecendo os princípios biológicos e a exigência da prática cirúrgica moderna. Sua composição em **polipropileno biocompatível, ultrarresistente e 100% impermeável** a torna ideal para procedimentos que exigem controle, previsibilidade e proteção em áreas críticas.

Disponível em dois formatos, **Bone Slim®** se adapta às técnicas distintas sem perder sua essência: **oferecer proteção precisa, com mínima espessura e máximo conforto clínico.**

BONE SLIM®

Solução para Proteção de enxertos/biomateriais.

Projetada para procedimentos quando a enxertia é inevitável, a **Bone Slim®** Proteção de enxertos/biomateriais atua como barreira física sobre biomateriais e enxertos em áreas que requerem ganho de volume. **Elimina complicações como deiscências e exposições**, aumentando a previsibilidade da regeneração.

Tamanho: 40 mm x 50 mm

Indicação: Eficaz para proteção de enxertos ou biomateriais usados em áreas que requerem aumento de volume.

Remoção: Até 28 dias, sem cirurgia

Esterilização: Radiação gama

Validade: 3 anos na embalagem original

Número ANVISA: 81197599003

BONE SLIM®

PROTECTOR PALATO

Proteção para Áreas Doadoras – Região do Palato

Desenvolvida para ser aplicada sobre áreas doadoras de enxertos na região palatina, a **Bone Slim® Protector Palato** garante mais conforto no pós-operatório, ajudando a controlar o sangramento e a dor. Sua superfície inerte **não se altera em contato com o meio bucal**, e a remoção é simples, **sem anestesia ou reintervenção cirúrgica.**

Tamanho: 30 mm x 40 mm

Indicação: Proteção de áreas doadoras na região palatina.

Remoção: Até 28 dias, sem cirurgia

Esterilização: Radiação gama

Validade: 3 anos na embalagem original

Número ANVISA: 81197599003

“A mesma qualidade, pensada para técnicas distintas.

“Bone Slim® – Uma tecnologia, dois usos. Para preservar ou proteger, você escolhe a técnica. Nós entregamos o desempenho.”

Fabricado por Bone Heal Indústria e Comércio Ltda.

Referência em soluções regenerativas que respeitam a fisiologia e valorizam a simplicidade clínica.

DISPONIBILIDADE LIMITADA!


Adquira a versão ideal para sua técnica e ofereça ao seu paciente o que há de mais moderno em proteção palatina e proteção de enxertos/biomateriais.

CONFORTO E SEGURANÇA NA PALMA DA SUA MÃO.



LANÇAMENTO

LINHA BONE SLIM®

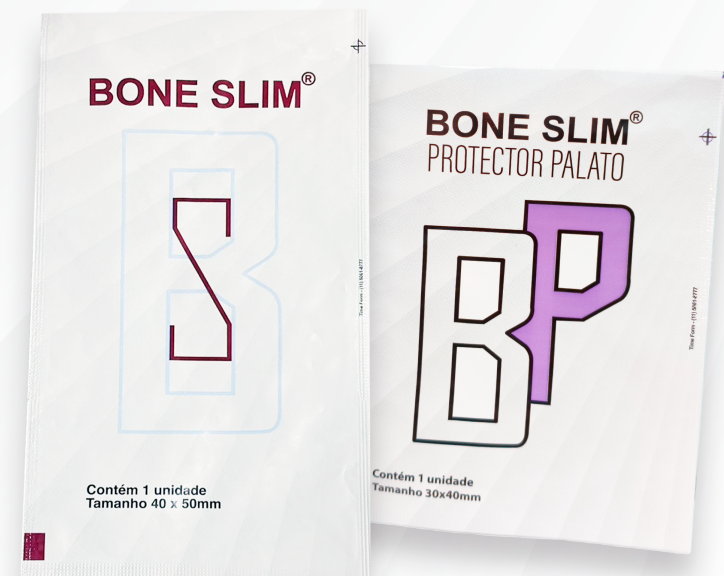

A escolha **inteligente**
para Cirurgiões-Dentistas




Acesse nosso site
www.boneheal.com.br



CONTATOS
Administrativo: (11) 99440-2278
Vendas: (11) 94512-2884
Email: contato@boneheal.com.br

BONE SLIM®

BONE SLIM®

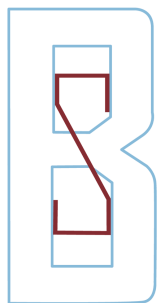

PROTEÇÃO DE ENXERTOS/BIOMATERIAIS

Projetada para procedimentos quando a enxertia é inevitável, a Bone Slim® atua como barreira física sobre biomateriais e enxertos em áreas que requerem ganho de volume.

Elimina complicações como deiscências e exposições, aumentando a previsibilidade da regeneração.

Passo 1: Preparação Inicial

Abrir a embalagem externa (sachê) - Fig.1

Remover o blister que contém o produto.
Remover o lacre (papel Tyvek que sela o blister) - Fig.2

Remover Bone Slim® de dentro do frasco de vidro utilizando uma pinça estéril

Passo 2: Aplicação da Barreira

Recortar com tesoura estéril, customizando e adaptando o produto sobre o enxerto - Fig.3

Reposicionar os retalhos e suturar

Passo 3: Remoção

BONE SLIM® deverá ser removida no máximo até 28 dias



Figura 1



Figura 2

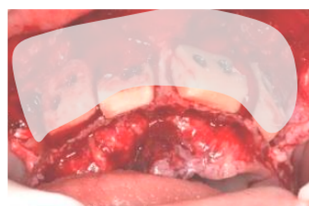


Figura 3

BONE SLIM® PROTECTOR PALATO

BONE SLIM® PROTECTOR PALATO



PROTEÇÃO PARA ÁREAS DOADORAS REGIÃO DO PALATO

Desenvolvida para ser aplicada sobre áreas doadoras de enxertos na região palatina, a Bone Slim® Protector Palato garante mais conforto no pós-operatório, ajudando a controlar o sangramento e a dor.

Sua superfície inerte não se altera em contato com o meio bucal, e a remoção é simples, sem anestesia ou reintervenção cirúrgica.

Passo 1: Preparação Inicial

Remover o blister que contém o produto.
Remover o lacre (papel Tyvek que sela o blister) - Fig.1

Remover BONE SLIM PROTECTOR® de dentro do frasco de vidro utilizando uma pinça estéril - Fig.2

Passo 2: Aplicação da Barreira

Recortar com tesoura estéril, customizando e adaptando o produto de acordo com a área a ser reparada - Fig.3 e 4

Suturar para manter BONE SLIM PROTECTOR® em posição. Fig.5

Passo 3: Remoção

BONE SLIM PROTECTOR® deverá ser removida em até 28 dias.



Figura 1



Figura 2

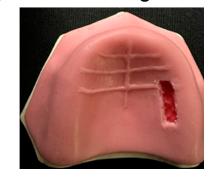


Figura 3

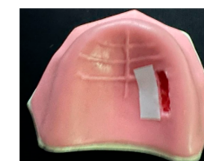


Figura 4

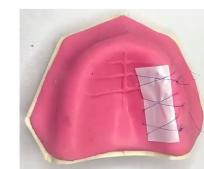


Figura 5